

GENV

ما معتقدیم که مشکلات صحتی دوران طفلی قابل حل است.

دستور العمل سواب بمپر GenV

جمع آوری نمونه مدفوع طفل شما

- قبل از اینکه شما شروع کنید

• لطفاً این دستور العمل ها را بخوانید

• **طفل با سن کمتر از یک هفته؟** نمونه را در سن 7 روزگی یا در

اسرع وقت بعد از آن جمع آوری کنید

• **طفل بیشتر از یک هفته سن دارد؟** نمونه را در اسرع وقت که

میتوانید جمع آوری کنید


• **جمع آوری را فراموش کرده اید یا مشکل است؟** نمونه خود را در

هر زمان برگردانید - هر نمونه مهم است


• بسته را گم کردید یا اشتباه کردید؟ - با ما تماس بگیرید:

تلفون: 1800 436 888 **وبسایت:** www.genv.org.au


- 1 شما نیاز خواهید داشت:
 1. این دستور العمل ها،
 2. بسته نمونه بمپر (nappy) شما، و
 3. یک قلم
- بمپر کثیف طفل تانرا عوض کنید
- بمپر کثیف را در یک طرف قرار دهید تا زمانی که طفل شما در حالت مصنون قرار گیرد (مثلاً گهواره)

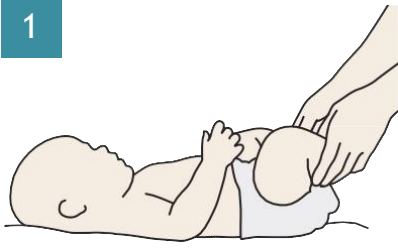


- 2 بمپر کثیف را روی یک سطح ثابت باز کنید
 - تیوب را بچرخانید تا باز شود، تا نوک سواب آزاد شود
 - مراقب باشید که نوک سواب را روی پوست یا هر سطح دیگری لمس نکنید

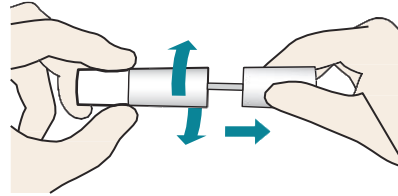


- 3 به آرامی با نوک سواب از مواد مدفوع در بمپر کثیف یک نمونه کوچک بردارید

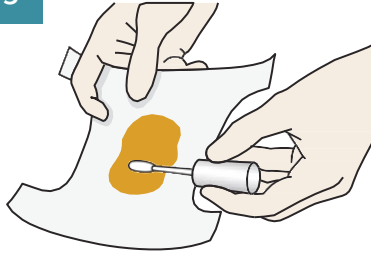


- 4 بسیار زیاد از مواد مدفوع بردارید
 - نوک سواب فقط باید کمی رنگ شود

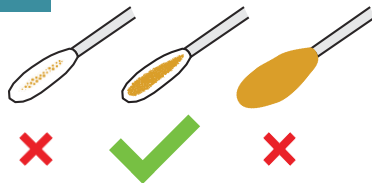


- 5 سواب را مستقیماً داخل تیوب قرار دهید
 - اجازه ندهید نوک سواب به پوست یا هر سطح دیگری برخورد کند
 - تیوب را محکم ببندید

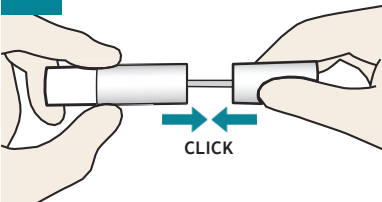

- 6 تاریخ را روی تیوب بنویسید، جایی که نوشته شده "تاریخ جمع آوری شدن" ("Date collected")

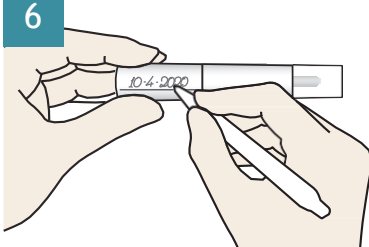

- 7 تیوب را داخل بسته سفید قرار دهید
 - لیه های تیوب را به هم فشار دهید تا با کمترین هوای ممکن بسته شود

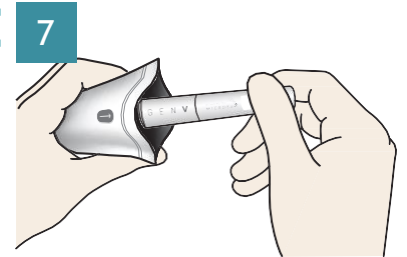

- 8 تیوب را در پاکت سفید پاسخ پرداخت شده جاسازی کنید
 - پاکت را بسته کنید
 - این میتواند در حرارت اطاق بماند (نه در یخچال یا فریزر)



- 9 پاکت را در عرض یک هفته یا در اسرع وقت به GenV ارسال کنید - ضرورت به پست ندارد آن را در هر صندوق پستی استرالیا انداخته میتوانید

